

## Instructions pour l'utilisation d'EnviroPouch (French)

1. Nettoyez soigneusement tous les instruments en les trempant dans une solution détergente à pH neutre, brossez à la main ou nettoyez à l'ultrason avec un nettoyeur ultrasonique
2. Placez les instruments ou les cassettes dans un sac EnviroPouch, collez le revers du sceau ou rabat avec un ruban indicateur à vapeur
3. Toujours utiliser un indicateur pour montrer l'exposition au processus de stérilization
4. Stérilisez dans un autoclave à vapeur à 250 F de 16 à 18 PSI pendant 20 minutes (recommandé d'attendre la durée d'utilisation d'EnviroPouch) ou à 270 F et 30 PSI pendant 5 minutes
5. Retirez l'EnviroPouch immédiatement à l'air sec
6. Les sacs EnviroPouch peuvent être lavés avec un détergent doux à cycle léger (Ne pas utiliser de l'eau de Javel). Laissez sécher à l'air les sacs avant de les réutiliser ou les sécher à la sécheuse à basse temperature
7. EnviroPouch a une durée de vie utile de 200 stérilisations multiples
8. Les conditions d'entreposage requièrent un endroit à température ambiante normale
9. Vérifiez l'état des sacs pour les dommages avant de les utiliser
10. L'appareil est non stérile



To Reorder Contact:

[www.EnviroPouch.com](http://www.EnviroPouch.com)

toll free 877-632-1991

office 770-632-1991

fax 770-742-0224

info@enviropouch.com